

CABINE MEDADOM

Manuel d'utilisation



**Scannez ce QR code
pour visiter
le centre d'aide**


Description de la cabine



La cabine de téléconsultation **MEDADOM** permet de mettre en relation un patient avec un médecin généraliste via une plateforme de téléconsultation. Elle permet ainsi de réaliser une consultation à distance à l'aide d'un système de vidéotransmission, et des outils mesurant différents paramètres cliniques.

La cabine MEDADOM présente **une structure isophone fermée rectangulaire**, et est constituée des éléments suivants :

- un sol en parquet (couleur bois chêne),
- un plafond disposant d'un détecteur de présence permettant d'éclairer la cabine quand elle est occupée et d'éteindre la lumière à la fin de téléconsultation,
- un système de ventilation et d'évacuation d'air,
- une lampe UV qui assure la désinfection des surfaces, pendant 15 minutes, après chaque utilisation (se lance 1 minute après que le patient soit sorti de la cabine),
- une porte vitrée opacifiée sur ses deux côtés.

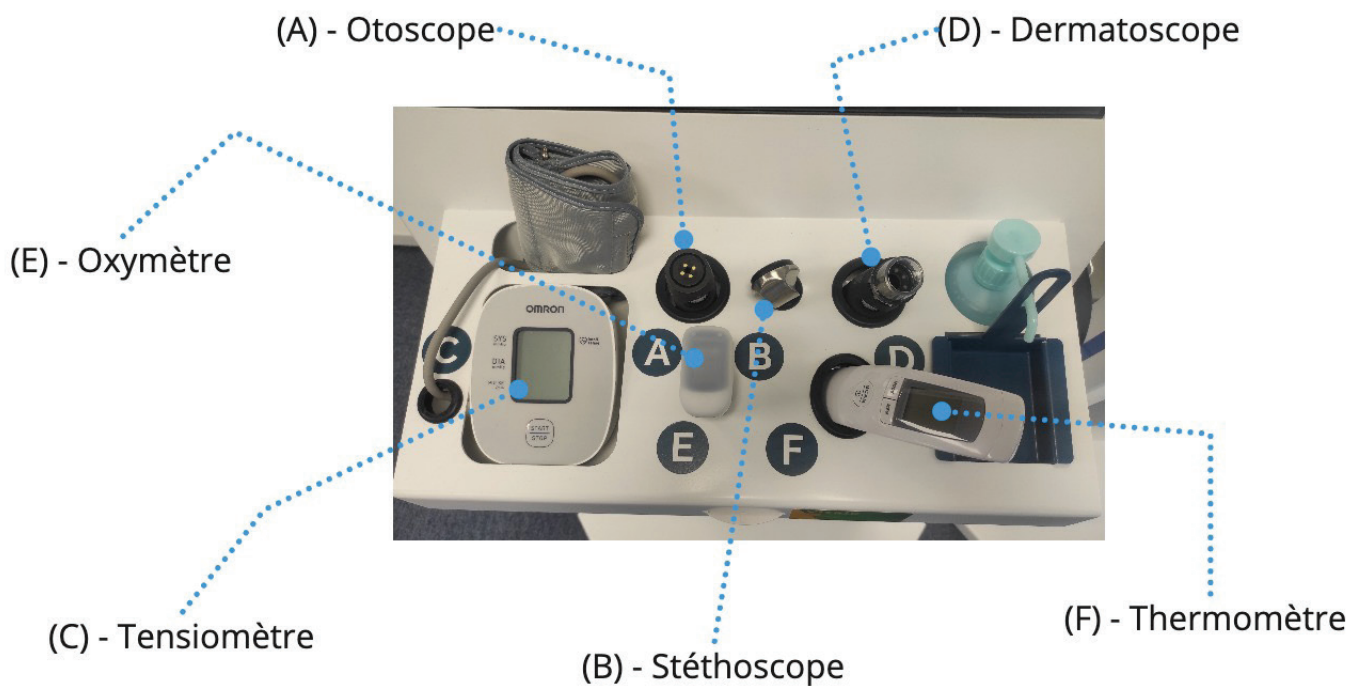

Chaque objet connecté est raccordé à l'unité centrale de la cabine.
Pour les reconnaître facilement, vous trouverez une gommette de couleur.

Couleurs	Objets	Lettres
Jaune	Dermatoscope	D
Vert	Stéthoscope	B
Rouge	Ootoscope	A
Orange	Lecteur carte vitale	-
Blanc	Webcam	

Remarque :

Si vous avez besoin de plus d'accessoires, rapprochez vous du support client au **01 86 65 55 15**, du lundi au samedi, de **9h à 19h30**.

MEDADOM



Lot d'embouts d'otoscope jetables x 48

Utilisez un embout d'otoscope pour chaque usage de l'otoscope. Il est également recommandé de jeter l'embout après chaque utilisation.

MEDADOM



Solution hydro-alcoolique

La solution hydro-alcoolique doit être utilisée par le patient avant et après chaque téléconsultation.



Kit de communication

Indications - Mise en garde - et contre-indications du dispositif

Indications

La téléconsultation au sein d'un dispositif de télémédecine MEDADOM est indiquée dans les situations suivantes :

- **Absence de médecin traitant** : lorsque le patient n'a pas de médecin traitant, la téléconsultation lui permet de consulter un professionnel de santé dans des délais rapides, sans rendez-vous.
- **Médecin traitant indisponible** : lorsque le patient a un médecin traitant mais que celui-ci n'est pas disponible, la téléconsultation lui offre la possibilité de consulter un professionnel de santé à distance, évitant ainsi les délais d'attente ou les difficultés pour obtenir un rendez-vous rapide.

Mise en garde

Lors d'une téléconsultation médicale, le médecin partenaire reste décisionnaire de sa prescription conformément à l'article 8 (R.4127-8 du code de la santé publique). Selon cette disposition, le médecin est libre de choisir les prescriptions qu'il estime les plus appropriées en fonction des limites fixées par la loi et des données acquises de la science.

Pour une téléconsultation médicale réussie, il est important d'avoir une connexion internet suffisante et stable, il est préférable d'assurer un environnement calme, sans bruit pouvant gêner l'échange avec le médecin téléconsultant, il est possible d'être accompagné par un proche si nécessaire.

Contre-indications

La téléconsultation via MEDADOM n'est pas indiquée pour la prescription de produits sur ordonnance sécurisée ; la prise en charge des enfants de moins de 3 ans ; l'édition de certificat d'aptitude; le renouvellement des arrêts de travail.

Les utilisateurs du dispositif

Il existe deux profils utilisateurs potentiels :

- **Le patient** : la personne qui utilise le dispositif MEDADOM pour bénéficier d'une consultation médicale à distance avec son médecin généraliste
- **Le professionnel de santé** qui utilise une interface dédiée au médecin accessible avec son ordinateur, qui lui permet de prendre en charge le patient à distance

Branchement de la cabine

Pour des raisons pratiques et techniques, nous recommandons de ne pas éteindre la cabine. Beaucoup de paramètres sont établis lors de l'installation de manière à ce que tout fonctionne correctement.

Lorsque la cabine est éteinte accidentellement ou non, un certain nombre de paramètres audios ou vidéos peuvent sauter.

Pour allumer la cabine, ouvrez-la par le biais du petit clapet sécurisé qui se trouve au dos (une clef est nécessaire pour l'ouvrir, livrée lors de l'installation).

Appuyer sur le bouton «Power» se trouvant sur le boîtier côté face vers le bas de la cabine. Cela permettra d'allumer l'unité centrale qui n'est autre que l'ordinateur faisant fonctionner la cabine.



Conseil :

Ne débranchez jamais votre terminal, sauf si celui-ci n'est pas accessible pendant plusieurs jours consécutifs (fermeture pour congés, weekend, etc).

Utilisation des objets de la cabine

Les objets peuvent varier en fonction de la version de votre cabine. Si votre objet n'est pas celui présenté ci-dessous, n'hésitez pas à vous rapprocher du service client au **01 86 65 55 15**, du lundi au samedi, de 9h à 19h30.

7 dispositifs médicaux :

- Un **thermomètre**, qui peut confirmer la fièvre, signalant la présence d'une infection virale ou bactérienne, associée à des signes cliniques
- Un **tensiomètre** pouvant évaluer la tension artérielle du patient
- Un **oxymètre** permettant de mesurer le taux d'oxygène dans le sang (dont les taux normaux se situent entre 95% et 100%)
- Un **stéthoscope connecté** permettant d'écouter les bruits cardiaques et une auscultation pulmonaire au cours de la téléconsultation
- Un **otoscope connecté** équipé d'une caméra qui est utilisé pour examiner l'oreille externe ou moyenne en cas de signes d'otite ou de bouchon d'oreille à l'interrogatoire
- Un **dermatoscope connecté**, lui aussi équipé d'une caméra, examinant l'épiderme en cas de lésions (piqûre d'insecte, éruptions, etc.) grâce à une lentille HD
- Une **toise** permettant de se mesurer (avec une précision à $\pm 5\text{mm}$)

1 objet non médical :

- Un **pèse-personne** permettant de se peser

Les manuels d'utilisation des dispositifs médicaux vous seront envoyés par notre équipe CRM dans l'e-mail de livraison

Les dispositifs médicaux connectés sont branchés à l'ordinateur par câble USB de sorte à les auto-alimenter ce qui assure leur autonomie de fonctionnement. De ce fait, ils sont accessibles et utilisables lors des téléconsultations. Les informations émises sont automatiquement transmises au médecin. Cette connexion filaire assure une fiabilité totale dans la transmission des données auprès du professionnel de santé.

Important :

Ne jamais mettre l'otoscope et le dermatoscope sous tension au même moment

Dans le cas où l'un des deux reste allumé avant la téléconsultation, ce sera sans doute la raison pour laquelle le médecin n'a pas pu obtenir d'image lors de la demande de mise sous tension (ou que l'autre appareil est resté sous tension).

Le thermomètre (F)



Le thermomètre numérique comprend deux modes de mesure. En plus de la mesure du front, par exemple, vous pouvez également mesurer la température des objets et de l'environnement (soyez donc vigilants si une température vous paraît suspecte, il se peut que ce soit une température de surface).

Utilisation



1. Vous devez être assis confortablement sur une chaise, au calme
2. Appuyez sur la gâchette, attendez quelques secondes afin que celui-ci se calibre
3. Positionnez le thermomètre à quelques centimètres du front afin de pouvoir prendre une mesure
4. Appuyez de nouveau sur la gâchette : une mesure apparaît

Le stéthoscope (B)



Le stéthoscope permet d'exclure certaines complications cardiaques et pulmonaires lors de la consultation en vidéo.

Utilisation



1. Placez-le à l'endroit où il est requis d'être posé par le médecin
2. Le médecin se chargera de l'allumer
A la fin de la mesure, reposez le stéthoscope, le médecin se chargera de l'éteindre à distance

L'oxymètre (E)



Ce dispositif médical est un saturomètre par infrarouge non invasif, il porte le marquage CE et n'est pas connecté. Il a pour fonction la mesure de la saturation pulsée en oxygène et la fréquence cardiaque à un moment donné.

Utilisation



1. Vous devez être assis confortablement sur une chaise, au calme
2. L'extrémité de votre doigt (préférentiellement l'index ou l'annulaire à gauche ou à droite) doit être bien enfoncée jusqu'à buter au fond de l'instrument, l'ongle vers le haut (vers l'écran). Il doit rester immobile pendant toute la prise de saturation
3. Le ou la patiente doit privilégier un doigt sans vernis pour ne pas fausser les mesures
4. **Appuyez sur le bouton ON** (à côté de l'écran LED), patientez quelques secondes en attendant que les mesures s'affichent (saturation pulsée en oxygène en % et la fréquence cardiaque en battements/minute)

Le tensiomètre (C)



Ce dispositif médical est un tensiomètre, il porte le marquage CE et il n'est pas connecté. Il a pour objet de mesurer la pression systolique et diastolique ainsi que la fréquence cardiaque à un moment donné.

Utilisation



1. Vous devez être assis confortablement sur une chaise, au calme
2. **Votre bras gauche** doit être fléchi sur une table, avec le coude à hauteur du cœur (au niveau de la poitrine)
3. Posez le brassard sur votre bras nu, en respectant le sens d'enfillement indiqué sur le brassard. Mettez l'appareil en marche (bouton Start/Stop) : le brassard se gonfle, puis se dégonfle automatiquement. Pendant la mesure, vous ne devez ni **parler, ni bouger, ni serrer le poing**
4. Enfin, vous obtenez la mesure de la tension artérielle (en mmHg) et sa fréquence cardiaque (en battements/minute)

Le dermatoscope (D)



Ce dispositif médical est un DE300 Digital Video Dermatoscope, il porte le marquage CE. Il a pour indication l'observation de surfaces cutanées, ou muqueuses réduites. Il est reconnaissable sur la cabine avec le sticker.

Utilisation



1. Allumez-le, en glissant le curseur noir vers la position OFF puis LED
2. Assurez-vous que la molette noire est glissée au maximum vers le haut
3. Maintenez votre pouce sur la molette grise, elle permet de faire la mise au point afin d'avoir une image nette (comme avec la lentille d'un microscope optique)
4. Posez l'embout au contact du tissu à observer (sauf en cas de lésions, il devra être placé à quelques centimètres du tissu)
5. Éteignez le dermatoscope en glissant le curseur noir vers la position LED puis OFF

Le dermatoscope ne fonctionne pas ?

Dans la plupart des cas, la problématique vient plutôt d'un défaut d'utilisation :

- Vérifiez que le curseur est bien sur la position LED 2 (curseur noir)
- Est-ce que 2 objets connectés (dermatoscope et otoscope) sont allumés ensemble ?
Si c'est le cas, veillez à bien éteindre l'un des deux outils (position OFF/ curseur noir)

L'otoscope (A)



Ce dispositif médical est un Vidéoscope LED Firefly DE500, il porte le marquage CE. Il a pour indication l'observation de l'ensemble de l'oreille externe (conduit auditif et tympan) à l'aide de spéculums auriculaires à usage unique.

Utilisation




1. **Allumez-le, en glissant le curseur noir vers la position OFF puis LED 1 puis LED 2**
2. **Augmentez la luminosité en glissant la molette noire au maximum (vers le haut)**
3. **Maintenez votre pouce sur la molette grise, elle permet de faire la mise au point afin d'avoir une image nette (comme avec la lentille d'un microscope optique)**
4. Tirez votre oreille vers le haut (sans douleur bien entendu !) et placez avec votre autre main l'embout au sein de l'oreille externe jusqu'à entrevoir le tympan et/ou le conduit auditif externe
5. Enfin, éteignez l'otoscope en glissant le curseur noir vers la position LED 2 puis LED 1 puis OFF

L'otoscope ne fonctionne pas ?

Dans la plupart des cas, la problématique vient plutôt d'un défaut d'utilisation :

- Vérifiez que le curseur est bien sur la position LED 2 (curseur non)
- Est-ce que deux objets connectés (dermatoscope et otoscope) sont allumés ensemble ?
Si c'est le cas, veillez à bien éteindre l'un des deux outils (position OFF/ curseur noir)

La toise

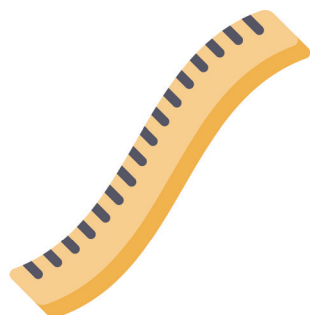

Ce dispositif médical est un mètre dérouleur mécanique (toise), il porte le marquage CE.

Utilisation

1. Placez-vous droit, contre le mur, en dessous du mètre dérouleur
2. Baissez le curseur jusqu'au niveau de la tête
3. La taille apparaît directement sur l'écran de la toise

Le pèse-personne



Ce dispositif est un pèse-personne numérique, il porte le marquage CE.

Utilisation

1. A l'aide de votre pied, ouvrez le tiroir à coulisse de la cabine et sortez le pèse-personne
2. Placez-vous debout sur la balance
3. Attendez quelques secondes, la valeur s'affiche directement sur l'écran
4. Après utilisation, remplacez le pèse-personne dans le tiroir

Installation et maintenance

L'installation du dispositif est confiée à une équipe externe formée par nos équipes internes. Cette équipe externe qualifiée est chargée d'assurer la mise en place du produit.

En cas d'impossibilité de résoudre un souci technique à distance, l'équipe est également formée pour effectuer des maintenances correctives sur place.

Formation du personnel accompagnant

Dès l'installation du dispositif MEDADOM, il est important que l'ensemble de l'équipe susceptible d'accompagner un patient à la téléconsultation prenne connaissance des vidéos de formation. Les vidéos sont disponibles dans l'espace dédié à la structure équipée.

En complément, notre équipe Customer Success Manager est à disposition pour approfondir les vidéos et pour vous transmettre les informations relatives aux subventions possibles liées à l'activité de téléconsultation au sein de votre structure, ainsi que les bonnes pratiques liées à la promotion du service.

SPÉCIAL PHARMACIE

MEDADOM

PROCÉDURE D'HYGIÈNE

Voici quelques mesures d'hygiène,
merci de les respecter.



POUR LE PATIENT

- ▶ **Se laver les mains** à l'aide d'une solution hydroalcoolique.
- ▶ **Porter une charlotte** sous le casque et un **masque de protection**.



POUR L'ÉQUIPE OFFICINALE

- ▶ Mettre en permanence à **disposition une solution hydroalcoolique**.
- ▶ Mettre **une poubelle à disposition près de la cabine**.
- ▶ **Nettoyer le micro du casque** avant chaque utilisation.
- ▶ **Nettoyer tout le matériel** avec une lingette.

A



Otoscope

D



Dermatoscope

Désinfecter les extrémités du dermatoscope et renouveler les embouts de l'otoscope après chaque utilisation.

L'embout transparent du dermatoscope ne se retire pas !

B



Stéthoscope

C



Tensiomètre

E



Oxymètre

F



Thermomètre

Désinfecter à l'aide d'une lingette nettoyante
après chaque utilisation.



**Ensemble respectons les gestes barrières
et limitons la propagation du virus !**



Support : 01 86 65 55 15 | contact@medadom.com

MEDADOM N'EST PAS UN SERVICE D'URGENCE. EN CAS D'URGENCE, APPELEZ LE 15.

Foire aux questions

Vous rencontrez des difficultés avec votre cabine ? Voici quelques cas courants avec leurs solutions. Pour tout autre problème, le service support est disponible par téléphone au **01 86 65 55 15**, du lundi au samedi de 9h à 19h30. Vous trouverez également des articles d'aide sur notre site **medadom.zendesk.com**.

Tout incident grave survenu en rapport avec le dispositif doit être signalé à **MEDADOM** et à **l'ANSM**.

Problème : La cabine ne s'allume pas



Cause possible ? Problème d'alimentation

Solution : Débranchez puis rebranchez la cabine > Appuyez sur le bouton power

Problème : Le lecteur de carte vitale ne fonctionne pas



Cause possible ? Le planificateur de tâche n'est pas en cours d'exécution

Solution : Ouvrez le planificateur de tâches > MEDADOM > clic droit sur "lecteur carte vitale" > Exécuter

Problème : Écran noir définitif ou aléatoire alors que la cabine est allumée, possible amas de pixels au milieu...



Cause possible ? Problème d'alimentation / Problème de mise à jour

Solution : Si la cabine est démarrée (lumière d'alimentation visible) -> **Débranchez et rebranchez le câble tactile et / ou HDMI au niveau de l'écran ou du NUC.** Se rendre sur Windows Update et **exécutez les mises à jours facultatives** (le problème d'écran noir peuvent venir d'un pilote obsolète)

Problème : Le dermatoscope ou l'otoscope n'est pas reconnu



Cause possible ? Un objet connecté n'est pas éteint

Solution : Éteignez l'otoscope et le dermatoscope, rafraîchissez la page puis allumez le bon objet connecté (otoscope ou dermatoscope)

Problème : Le clavier tactile n'apparaît pas



Cause possible ? Mode tablette non activé

Solution : Rendez-vous dans les réglages Windows, puis activez le mode tablette "par défaut"

Attention : cette opération n'est pas valable sous Windows 11

Problème : Problème de micro/casque



Cause possible ? Le micro n'est pas « autorisé » pour l'utilisation dans le navigateur Chrome / Micro mal branché / La molette n'est pas tournée au maximum

Solution : Bien vérifier dans un premier temps que le micro est « **autorisé** » pour l'utilisation dans le navigateur Chrome dans les paramètres de confidentialité de Chrome

Vérifiez le **branchement du micro** dans la prise « jack » du NUC à l'arrière de la cabine.

Vérifiez que le bon périphérique est utilisé en sortie (paramètres - général - son) ou décochez puis recochez le bon périphérique

Certains casques sont équipés d'une molette de réglage de son, et d'un switch permettant de couper le micro. Bien vérifier que tout est opérationnel

Faire un test d'enregistrement avec l'application Windows « enregistreur vocal ». Cette application native permet de vérifier le bon fonctionnement du micro et la lecture de l'enregistrement permet à l'utilisateur de tester le bon fonctionnement des hauts parleurs du casque

Si tout a été vérifié et que le micro ou le casque ne fonctionne toujours pas
-> redémarrez la cabine et refaire les tests

Problème : Problème de connexion à la téléconsultation



Cause possible ? Problème lié à la connexion internet

Solution : Vérifiez que les autres postes ont bien accès à internet s'ils sont connectés au même réseau

Charger une page internet dans le navigateur par exemple et faire une recherche.
Faire un speedtest pour vérifier le débit ascendant et descendant

Cause possible ? Problème de connectique / Un objet connecté est resté allumé / Problème de câble USB

Solution : Si l'écran est noir et que rien n'est visible / qu'un message d'erreur apparaît, vérifier la connectique et changez éventuellement de port USB. Un redémarrage peut être nécessaire si aucune image n'est visible et que la webcam ne s'allume pas.

Si l'image du dermatoscope ou de l'otoscope apparaît en image principale, vérifiez que le bouton permettant de changer de caméra en haut à droite de l'écran est visible. En cliquant dessus, l'image de la webcam devrait apparaître. Dans ce cas de figure, il ne s'agit pas d'un problème technique mais d'une erreur de manipulation : un appareil connecté est resté allumé avant la téléconsultation et a été considéré comme webcam par l'interface de MEDADOM. Il est important de vérifier que ces appareils sont éteints avant chaque téléconsultation.

Si l'image de la webcam est correcte dans l'application caméra et que cela fonctionne normalement, vérifiez les autorisations de caméra pour les sites internet dans les paramètres de Chrome. Si cela a été modifié par inadvertance, la webcam ne s'activera pas au moment de lancer l'interface de MEDADOM

Allez sur le site <https://fr.webcamtests.com/> pour voir si la webcam se lance bien.

Si l'image clignote / saute / est intermittente: changez de port USB dans un premier temps et vérifiez le câble USB

Sécurisation les données

MEDADOM assure la protection des données à caractère personnel, notamment celles relatives à la santé du patient. La Politique de protection des données personnelles des patients est accessible sur le site de **MEDADOM** : <https://www.medadom.com/politique-de-confidentialite>

Signification des symboles

Nom et adresse du Fabricant (assembleur)	
Date de fabrication (assemblage)	
Numéro de série	
Consulter les instructions d'utilisation	
Précaution	
Identifiant unique de dispositif	



Pour contacter MEDADOM

Ligne directe du support client : **01 86 65 55 15**
du lundi au samedi de 9h à 19h30

Centre d'aide
medadom.zendesk.com

Formez vous sur **info.medadom.com**

Visitez

notre centre d'aide



Pour scanner,
utilisez votre appareil photo

Pour contacter MEDADOM

Ligne directe du support client : **01 88 24 22 87**,
du lundi au samedi de 9h à 19h30